

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

БАНДАЖ НА БРЮШНУЮ СТЕНКУ

AB-412

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж Orlett медицинский на брюшную стенку, арт. АВ-412, обеспечивает легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки за счет нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и натяжения эластичного материала, опоясывающего туловище.

Способствует формированию послеоперационного рубца, в том числе и глубокого (мышечного) за счет защиты и разгрузки соединительно-тканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки. Высота бандажа Orlett на брюшную стенку, арт. АВ-412 — 30 см.

Для удобства фиксации бандажи больших размеров, начиная с размера XL, снабжены двойным правым клапаном. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение;
- профилактика образования послеоперационных грыж передней брюшной стенки (при слабости мышц, после больших разрезов);
- профилактика ущемления вправляемых послеоперационных грыж, грыж белой линии живота, пупочных грыж;
- может назначаться в период восстановления после нормальных родов, в качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, почек, ожирения 3-4 степени (для подтяжки живота и улучшения силуэта в эстетических целях), при реабилитации после липосакции передней брюшной стенки, после пластических операций.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии;

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-412, состоит из:

1. эластичного пояса с застёжками-липучками велкро;
2. нерастяжимого пелота.

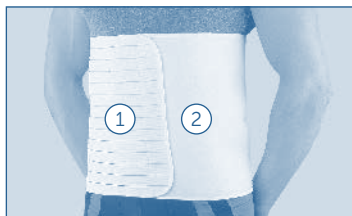


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж Orlett, арт. АВ-412, надевают в положении лёжа перед подъёмом с постели. Нерастяжимый пелот должен располагаться в области послеоперационного рубца или грыжевого выпячивания. При необходимости грыжевое выпячивание предварительно вправляется.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

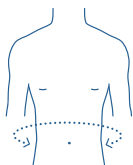

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность талии.

Согласно полученным результатам подбирается бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность талии, см
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135
XXXL	более 135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами,

рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

36% полиэстер, 20% вискоза, 15% полиамид, 15% эластан, 6% хлопок, 5% полиуретан, 3% сталь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. АВ-412, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74409 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

